



ルクミー
午睡チェック

午睡チェック補助システム
業界シェア

No.1



保育施設における
午睡中の死亡事故を
ゼロに。



その思いから生まれた、ルクミーの午睡見守りシステム。

* 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「ミックITリポートMonthly」2023年10月号「午睡チェックセンサー市場における有力ベンダーの導入実績比較分析」より。
2022年度における累計センサー出荷台数、累計利用園児数、累計導入施設数それぞれで一位を獲得。 <https://mic-r.co.jp/micit/>

ルクミー午睡チェックは、睡眠中の子どもたちを見守る 保育専用の午睡チェックサービスです。

ルクミー午睡チェックの3つのポイント

ポイント


1 センサーが体動を検知



園児のおなかに取り付けたボタン式センサーが体動を検知します。

ポイント

2 うつ伏せ寝や体動静止が続くとアプリがお知らせ

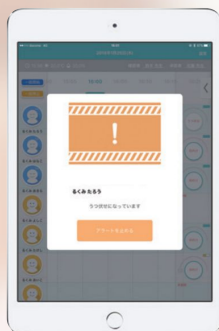

うつ伏せ寝や体動静止状態を検知し、その状態が一定時間続いた場合、アラートですぐにお知らせします。

ポイント

3 アプリがからだの向きをチェック表に自動記録



体の向きをチェック表に自動で矢印で記録。さらに睡眠時間も連絡帳や個別日誌に自動連携。

保育現場からの声をもとにリニューアル。

午睡センサーがもっと使いやすくなって 新しくなりました！



より使いやすく、より負担を少なくした新設計

ポイント

1 耐用期間が3年→4年に

ポイント

3 電池カバーとネジを本体から外れにくい設計に！



フタと本体が分離しにくい構造！

ポイント

2 電源オン・オフ機能が付いて、電池寿命が延長。
約4週間→約8週間に！

※1日4時間使用、周囲温度：25℃の場合

どうしてルクミーは電池交換式なの？

ルクミーでは、毎日の忙しい業務の中で「充電し忘れていた！なんてことは防ぎたい」というお声をいただいております。電池式の改良に努めております。

新しいセンサーなら電池交換は約8週に1回程度。
充電時間も不要で交換すればすぐに使えます。

※ ルクミー午睡チェックは一般医療機器 スマートボタン体動センサMB-02[医療機器届出番号：1082X00011000011]の愛称です。本品は、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防や、睡眠障害(睡眠時無呼吸等)の病気の評価に用いる機器ではありません。乳児の状態は本品による体動の情報だけで判断せず、必ず保育士が確認してください。乳児の状態異常に気づくのが遅れ、重大な健康被害(重体または死亡)につながる可能性があります。本品との接触により、乳児の皮膚に発赤やかぶれ等の過敏症状が現れた場合は、使用を中止して医師に相談してください。分解、修理、改造は絶対に行わないこと。

最新情報・サービス詳細・お問い合わせは

<企画・運営>

ルクミーのサービス紹介サイト

<販売代理店>

<https://lookmee.jp>

ルクミー で検索！

